



Diversey™

# Oxivir Sporicide CE

## Detergente desinfetante de largo espectro

### Descrição

Oxivir Sporicide é um detergente desinfetante que limpa e desinfeta num único passo, pronto a usar, eficaz contra *Clostridium difficile* e *Bacillus subtilis*. Com uma formulação à base de peróxido de hidrogénio acelerado (AHP), patenteado pela Diversey, Oxivir Sporicide pode ser usado em dispositivos médicos não invasivos e em superfícies duras.

### Propriedades

- Eficaz contra *C difficile* em 1 minuto\*
- Esporicida, Bactericida, Virucida, Leveduricida, Fungicida, em menos de um minuto
- Seguro para os utilizadores e para as superfícies, quando comparado com outros esporocidas
- Poder de limpeza efetivo
- Isento de perfume
- Os agentes ativos dão origem a água e oxigénio - Não deixa resíduos na superfície
- Não contém cloro nem álcool

### Benefícios

- Excelente resposta a surtos de *C difficile*
- Ampla eficácia contra todas as outras classes de agentes patogénicos, proporciona um elevado nível de proteção dos pacientes
- Tempos de contacto reduzidos, assegura uma desinfeção eficaz
- Não necessita de enxaguamento
- Não provoca irritação respiratória
- Adequado para usar em zonas de elevado risco, como áreas hospitalares, incluindo UCI, UCIN, enfermarias e quartos de isolamento
- Pulverizador de espuma permite uma aplicação eficiente. Não aplicar em dispositivos médicos invasivos

### Instruções de utilização

#### Limpeza e desinfeção por pulverização:


1. Remover a sujidade difícil.
2. Aplicar pulverizando o pano ou diretamente na superfície, usando a garrafa pulverizadora.
3. Após o tempo de contacto \* e \*\*, deixar secar ao ar, ou secar com a ajuda de um toalhete seco..



CE  
0088



AHP™/MC  
Patented

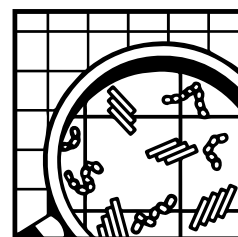

© A.I.S.E.

\*Os níveis de dosagem foram estabelecidos para condições ideais de utilização, pelo que poderão variar de acordo com a situação de cada cliente (dureza da água, nível de sujidade, procedimentos). Para informação mais detalhada, consulte, por favor, o seu representante Diversey.



# Oxivir Sporicide CE

## Dry Wipes Dispensador de Toalhetes Descartáveis:

1. Preparar o sistema Dry Wipes Dispensador de Toalhetes Descartáveis, de acordo com as instruções.
2. Remover a sujidade difícil.
3. Retirar apenas um toalhete e limpar a superfície.
4. Após o tempo de contacto \* e \*\*, deixar secar ao ar, ou secar com a ajuda de um toalhete seco.
5. Substituir o toalhete quando estiver visivelmente sujo ou sempre que mudar para outra área a limpar.

\* Quando usado como desinfetante, após um passo de limpeza em separado

\*\*Garantir que a superfície se mantém molhada durante o tempo de contacto

## Dados Técnicos

Aspeto: Líquido incolor , transparente

pH (em uso): 2,7 ± 0,3

Densidade relativa (20 °C): 1,03265

Validade: 720 dias

*Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.*

## Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com). Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Apenas para uso profissional/especialistas.

Reage com substâncias oxidáveis.

## Compatibilidade do produto

Não misturar com outros produtos químicos. Não usar em superfícies sensíveis à água e a ácidos. Segundo as recomendações de utilização, Diversey Oxivir Sporicide é adequado para utilização na maioria dos materiais normalmente encontrados.

## Dados microbiológicos

Eficácia comprovada de acordo com as normas europeias EN17126, EN13727, EN13624, EN13697, EN14476, EN13704, EN14348 e EN16615.

## Informação ecológica

Os surfactantes utilizados estão em conformidade com os requisitos da regulação europeia de detergentes, EC 648/2004.